


ULTRASONIDO

PROFI NEO

- 1- Pieza de mano de bicarbonato de sodio
- 2- Pieza de mano de ultrasonido
- 3- Panel de control
- 4- Interruptor de encendido/apagado y selección de funciones de ultrasonido y chorro de bicarbonato de sodio
- 5- Interruptor de selección de la potencia de los ultrasonidos
- 6- Banda naranja que indica el límite de potencia recomendado para Tips Endo
- 7- Franja naranja + marrón que indica el límite de potencia de Tips Perio
- 8- Interruptor de encendido/apagado de la bomba peristáltica y control del flujo de líquido

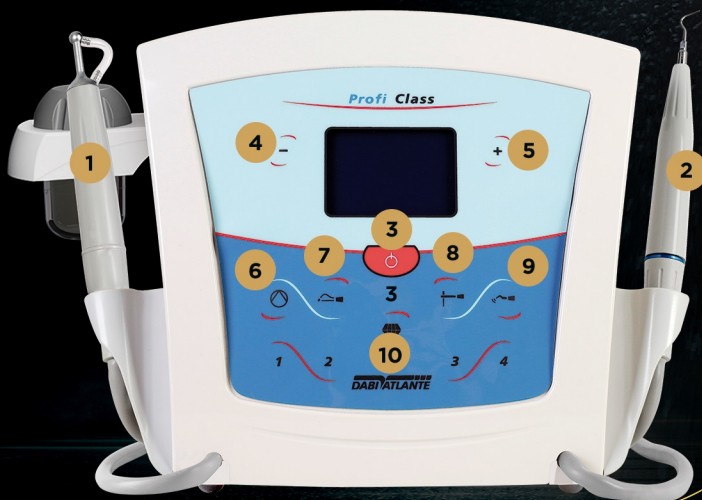

PROFI CLASS

- 1- Pieza de mano de bicarbonato de sodio
- 2- Pieza de mano de ultrasonido
- 3- Panel de control
- 4- Botón -
- 5- Botón +
- 6- Bomba peristáltica
- 7- Chorro de bicarbonato
- 8- Ultrasonido Endo
- 9- Ultrasonido Perio
- 10- Dentística

¿QUÉ ES EL ULTRASONIDO?

Generador de ondas ultrasónicas (con una frecuencia entre 24000 y 30000 Hz) que, a través de un transductor, utilizando pastillas de cerámica, transmite a los instrumentos activos, la vibración mecánica en la misma frecuencia y que ayuda al cirujano dental en varias prácticas dentales, tales como: periodoncia, endodoncia, prótesis, cirugía y otros.

¿QUÉ ES UN CHORRO DE BICARBONATO?

Se trata de una mezcla presurizada de aire, agua y bicarbonato sódico, conducida a través de conductos hasta la boquilla de la pieza de mano, donde forma un chorro uniforme que se utiliza para la eliminación de la placa bacteriana, la materia alba y las manchas dentales.

- El ultrasonido dental se utiliza para la eliminación del biofilm mineralizado o para el tratamiento endodóntico, también tiene un chorro de bicarbonato para la eliminación biofilm desmineralizado.
- Viene con 2 puntas Perio Sub y 1 Perio Supra y una llave universal.
- Cuerpo de dimensiones reducidas, ligero y fácil de colocar para trabajar
- Contiene: unidad generadora de ultrasonidos, filtro de aire, válvula neumática doble, depósito de bicarbonato sódico, bomba peristáltica, sistema de aire comprimido, LED que indica que el dispositivo está energizado, selector de ultrasonido o chorro de bicarbonato; selector de potencia de ultrasonidos de siete etapas que permite una mayor o menor potencia y tecla de ajuste de tres niveles del caudal de riego del peristáltico del líquido de la bomba peristáltica.



PERIO SUB

Puntas indicadas para la eliminación del cálculo dental subgival.



PERIO SUPRA

Recomendado para eliminar el cálculo dental de todas las superficies supra gingivales, especialmente de los dientes posteriores.



PERIO E

Eliminación del sarro en las superficies bucal, lingual y cervical de los dientes anteriores.



REMO C

Asiste en la retirada de prótesis y coronas provisionales.



REMO N

Indicado para ayudar a la eliminación de núcleos metálicos.



ENDO G

Asiste en la obturación de los conductos radiculares, la plastificación de la gutapercha y la apertura del espacio lateral.



ENDO L

Ayuda en la instrumentación, la irrigación de los conductos adiculares y la eliminación de cuerpos extraños.

Fotos ilustrativas. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las especificaciones técnicas de los productos previa autorización de ANVISA para perseguir su mejora. Ultrasonido: Anvisa 10101130067. Tips: Anvisa 10101139031. 51000000163 - Versión: Feb/2022.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABI ATLANTE