

# Catálogo Mocho Sela


## DESCRIPTIVO MOCHO SELA

Nosso mocho é projetado para oferecer mobilidade, ergonomia e segurança para longos períodos de trabalho, complementando o consultório e preservando a sua saúde e bem-estar.

- Mochos com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia
- Assento Bipartido para maior conforto
- Estofamento em material rígido e resistente, com densidade adequada e anti-deformante
- Base com 5 rodízios de Poliuretano macio (PU), resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade
- Possui ajuste de altura - assento com sistema central de elevação a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves
- Ajuste de Altura do Encosto através de sistema de catraca
- Ajuste Horizontal do Encosto, através de alavanca que ao empurrar para baixo com a mão e utilizando o apoio das costas, promove o ajuste do encosto. Chegando na posição desejada, basta puxar a alavanca com as mão para cima

## MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

Mocho Sela

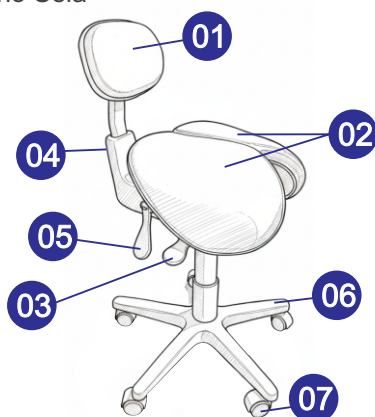

- 01 - Encosto
- 02 - Assento bipartido
- 03 - Alavanca regulagem altura do assento
- 04 - Catraca regulagem altura do encosto
- 05 - Alavanca ajuste Horizontal do encosto
- 06 - Base
- 07 - Rodízio



NOTA: Estofamentos laminado PVC, couro ou ultra leather, disponíveis em diversas cores \*

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Mocho Sela

Peso Líquido

11,00 Kg

Peso Bruto

14,00 Kg

Capacidade de Carga

110,0 Kg

### Simbologias da embalagem



Empilhamento máximo, determina a quantidade máxima de caixa que pode ser empilhada durante o transporte e armazenamento “conforme embalagem”.



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de umidade (não expor à chuva, respingos d'água ou piso umedecido).




Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com o lado da seta para cima.



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de luz.




Determina que a embalagem deve ser armazenada e transportada com cuidado (não deve sofrer quedas e nem receber impactos).

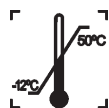

Determina os limites de temperatura dentre os quais a embalagem deve ser armazenada ou transportada.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional (mm)

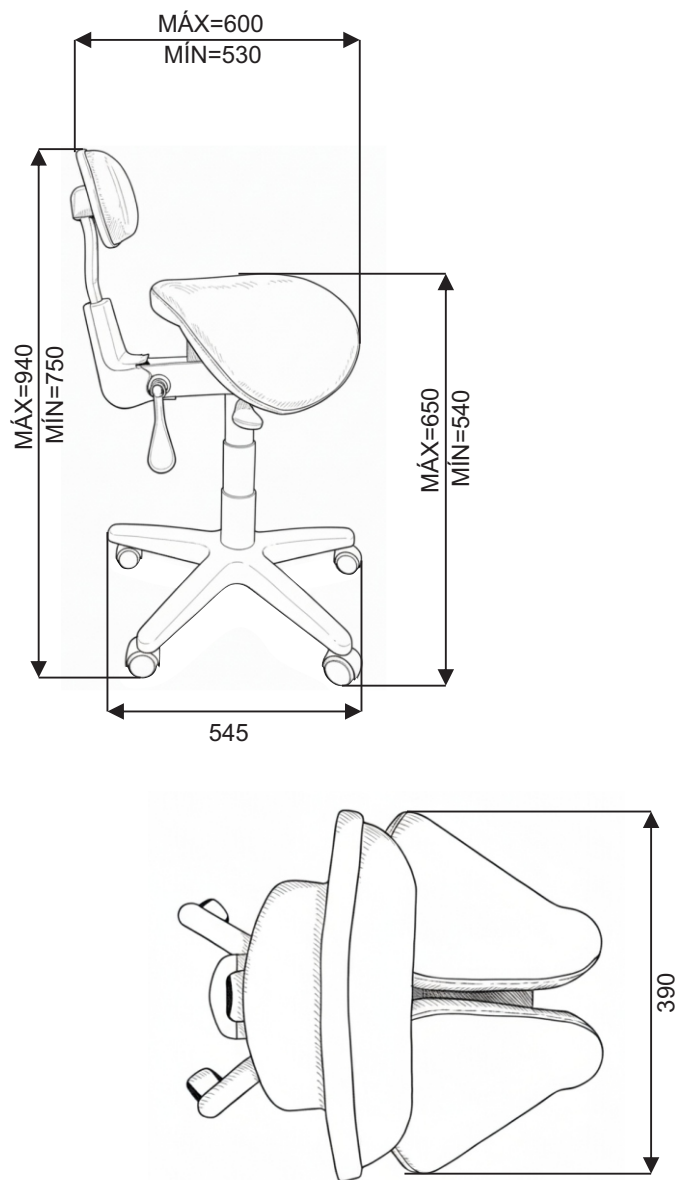


# Catálogo Mocho Sela

## OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

### Regulagem do assento

**SUBIR:** Suspenda o corpo e, com um leve toque para cima na alavanca (01), o assento subirá automaticamente. Solte a alavanca na altura desejada.

**DESCER:** Sente no centro do mocho e, com um leve toque para cima na alavanca (03), o assento descenderá com o peso de seu corpo (mínimo 50Kg). Solte a alavanca na altura desejada.

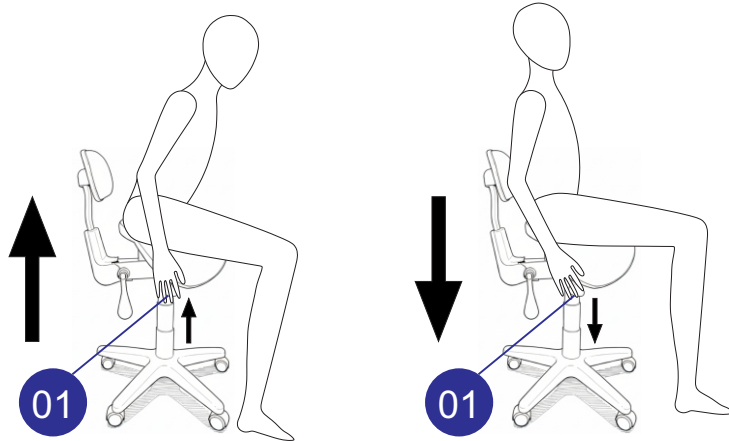


## OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

### Regulagem do encosto (Mocho Sela)

**VERTICAL:** O ajuste da altura do encosto é feito manualmente (sistema catraca) (03), basta puxá-lo e soltar na posição desejada.

**HORIZONTAL:** Acione a alavanca (04) e ajuste a inclinação do encosto na posição desejada.

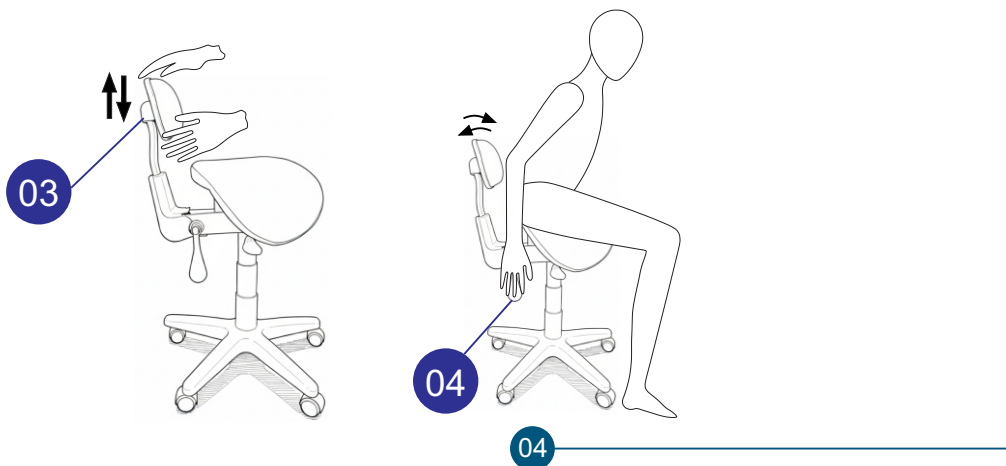

## PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

### Recomendações para a conservação do equipamento

Seu equipamento foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da moderna tecnologia. Todos os aparelhos necessitam de cuidados especiais, que muitas vezes são esquecidos por diversos motivos e circunstâncias, aqui estão alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

### Condições de transporte, armazenamento e operação

O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações:

- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos.
- Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d'água ou piso umedecido.
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original.
- Ao transportar, não movê-lo em superfícies irregulares e proteja a embalagem da chuva direta e respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.



#### Atenção

O Equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido (armazenado) conforme mencionados nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais.

### Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do equipamento



Cuidados para a limpeza dos Estofamentos (laminado PVC "courvin", couro ou ultraleather)

Jamais utilizar qualquer tipo de álcool, material microabrasivo, detergentes que contenham solventes tais como éter ou tira manchas para limpeza dos estofamentos, pois isto poderá provocar manchas.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em laminado PVC (courvin) ou ultraleather:

- Recomendamos o uso de um pano umedecido em água com sabão neutro.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em couro:

- Para limpeza e hidratação dos estofamentos em couro, recomendamos a utilização de produtos exclusivos para este fim.
- Nunca molhe ou esfregue rigorosamente o couro. Caso caia sujeira sobre o couro que venha a manchá-lo, limpe-o imediatamente com um pano umedecido em água com sabão neutro.

## CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

### Procedimentos adicionais para reutilização

O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, necessitando apenas de limpeza e desinfecção.

#### Limpeza geral



##### Atenção

- Visando eliminar riscos de segurança ou danos ao equipamento, recomendamos que ao efetuar a limpeza não haja penetração de líquidos no interior do mesmo.
- Para efetuar a limpeza do equipamento utilize um pano umedecido em água com sabão neutro. A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base de solventes ou hipoclorito de sódio não são recomendados, pois podem danificar o equipamento.

#### Manutenção Preventiva

O equipamento deverá sofrer aferições rotineiras, conforme legislação vigente do país. Mais nunca com período superior a 3 anos.

Para a proteção do seu equipamento, procure uma assistência técnica autorizada para revisões periódicas de manutenção preventiva.

## GARANTIA DO EQUIPAMENTO

Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia e normas contidas no Certificado de Garantia que acompanha o produto.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o que diz respeito à reposição de peças.

Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais. Elas têm a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pelo representante.

Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela manterá seu equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu aparelho.

Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante na revenda mais próxima, ou solicite através do Serviço de Atendimento: + 55 (16) 99115-3623.